

Wskazówki użycia inhalatora :

- inhalator składa się z 3 części. Zewnętrzny kubek, wewnętrzny i część nosowa
- przed pierwszym użyciem umyj wszystkie elementy wodą z detergentem i dokładnie wypłucz,
- zalej inhalator wrzątkiem do 2/3 wysokości dodając nasze mieszanki i odczekaj kilka minut. Możesz wlać olejki eteryczne/ sól kuchenną
- nałóż ostrożnie część nosową i sprawdź czy dobrze przylega
- możesz rozpoczynać inhalacje
- pamiętaj aby zachować bezpieczny odstęp nosa od wnętrza inhalatora. Para ma wysoką temperaturę, delikatnie wyczuj jaka odległość jest komfortowa
- zewnętrzny kubek jest po to by wrzątek zatrzymać wewnątrz i można się bezpiecznie przemieszczać z inhalatorem
- kubek powinien stać w pionie, nie pijemy - inhalujemy
- pod żadnym pozorem nie przechylać kubka w trakcie inhalacji **RYZIKO POPARZENIA!**
- po użyciu możesz włożyć do zmywarki
- dzieci powinny używać inhalatora TYLKO przy OPIEKUNACH - ryzyko poparzenia!
- Certyfikat CE
- podmiot odpowiedzialny MDP sp z o.o. ul. Dworcowa 7g, 82-103 Jantar